

Инструменты стоматологические

Состав

Хирургические инструменты изготовлены из нержавеющей стали AISI 410 и ее составных элементов, в соответствии с нижеуказанным:

ASTM стандарт	Химический состав для стали AISI 410						
	C	Mn (Max)	P (Max)	S (Max)	Si	Cr	Ni (Max)
	0,09 – 0,15	1,00	0,04	0,03	1,00	11,50 - 13,50	1,00

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стоматологические инструменты должны стерилизоваться методом автоклавирования в специальных, предназначенных для этого стерилизационных пакетах. Для предотвращения перекрестной инфекции необходимо соблюдать следующие этапы стерилизации:

Дезинфекция:

- Используйте растворы с нейтральным PH не содержащие хлора.
- Продолжительность дезинфекции согласно инструкции производителя.
- Тщательно промойте дистиллированной водой после дезинфекции

Очистка:

- Механическая очистка и использование ультразвуковой ванны.
- Промывка дистиллированной водой
- Инструмент должен быть тщательно высушен перед укладкой в пакет.
- Упаковка каждого инструмента производится в отдельные стерилизационные пакеты.

Стерилизация:

Автоклавирование при температуре 134°C с высушиванием.

Хранить в стерилизационных пакетах в хирургических шкафах 5°C - 40°C, влажность < 80%.